

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím doporučujeme pozorně přečíst.

NÁZEV: Rollboard – podložka pro přesun pacienta

TYP: NP-10/K

VÝROBCE:



EGO Zlín, spol. s r. o.
U Pekárny 438
763 14 Zlín – Štípa
Česká republika

IČO: 46902473
tel: +420 577 100 031
fax: +420 577 914 363
www.egozlin.cz

Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.



ÚČEL POUŽITÍ:

Podložka slouží pro přesun pacienta v rovině (například z lůžka na lůžko) s minimální námahou pro obsluhující personál.

POPIS VÝROBKU:

Rollboard se skládá z vnější části tvořící obvodový plášť a vnitřní pevné části - podložky, která je vyrobena ve skládacím provedení. Snadný přenos složeného Rollboardu umožňují dva textilní úchyty. Použitý materiál je pevný, odolný proti protržení a snadno se udržuje.

Rozměry v rozloženém stavu: 164 x 50 x 2 cm


Rozměry ve složeném stavu: 80 x 50 x 4 cm

Hmotnost: 1800 g

POSTUP POUŽITÍ:

Před použitím Rollboard vizuálně zkontrolujte a ujistěte se, zda obě plochy, mezi kterými budete pacienta přesunovat, jsou stabilní, zabrzděné a ve vodorovné poloze.

1. Pacienta otočte na bok a rozložený Rollboard pod něj podsuňte alespoň jednou třetinou, poté položte pacienta zpět na záda.
2. Lehkým tlakem na rameno a kyčel pacienta ho posuňte (bez použití síly).
3. Pacienta otočte na bok, vyjměte Rollboard a pacienta položte zpět na záda.

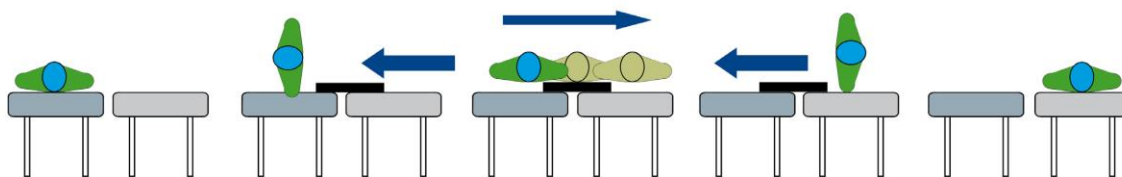

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ:

Matraci lze čistit běžnými čisticími prostředky (saponáty, mýdlová voda, apod.). Pro desinfekci použijte běžné desinfekční prostředky a postupujte dle pokynů uváděných výrobcem.

Podložku skladujte v suchých a čistých prostorech při teplotě od + 5 °C do + 35 °C.

Životnost výrobku závisí na četnosti používání, dodržení předepsané údržby a způsobu skladování.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS:

Záruka je poskytnuta po dobu 24 měsíců od data prodeje.

V této záruční lhůtě opraví EGO Zlín, spol. s r.o. kompletně všechny závady způsobené vadou materiálu nebo zpracováním u výrobce.

Záruka se nevztahuje na běžné fyzické opotřebení, na vady způsobené nesprávným zacházením uživatele a na mechanické poškození.

EGO Zlín, spol. s r.o. zajišťuje záruční i pozáruční servis po celou dobu životnosti výrobku.

UPOZORNĚNÍ:

Nenahrazujte ani nedoplňujte žádné části Rollboardu jinými.

Rollboard používejte pouze za účelem výrobcem určeného použití.

Výrobce nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za nevhodné použití výrobku.

Datum vydání návodu: 7. 1. 2019

Rev.00