



## EZ-100/150 Podložka pro přesun pacienta

*Systém pro přenos pacientů*

### *Návod k použití*

#### **PŘEDMLUVA**

Před použitím tohoto výrobku doporučujeme, abyste si přečetli všechny informace uvedené v tomto návodu k použití. Konstrukce a vylepšení výrobku jsou v souladu s požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Tyto pokyny jsou pouze vodítkem a nenahrazují protokoly a postupy, které navrhl váš koordinátor pro manuální manipulaci.

#### **POPIS VÝROBKU**

EZ-100/150 je lehké, sklopné zařízení na přesun pacientů, pomocí kterého lze pacienta přenést mezi lůžkem a rentgenovým stolem, operačním stolem, sprchovým vozíkem nebo nosítky sanitky. Jde o účinnou desku na přesun pacienta a polstrovanou posuvnou trubici v jednom.

#### **SPECIFIKACE VÝROBKU**


EZ-100/EZ-150 Podložka pro přesun pacienta

	<b>EZ-100</b>	<b>EZ-150</b>
<b>VELIKOST</b>	177 X 55cm (±3%) (nesložená) 88 x 55cm(±3%) (složená)	89 x 53,5 cm (± 3%)
<b>HMOTNOST</b>	2,5 KG (±3%)	1,4 KG(±3%)

#### **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

- Před přenosem pacienta se ujistěte, že jsou postel, nosítka, vozík a stoly bezpečně zajištěny brzdou.
- Předtím, než na ně položíte EZ-100/150, ujistěte se, že jsou postel a nosítka, vozík či stoly ve vyrovnané poloze.  
Maximální bezpečná mezera pro přenos je 15 cm mezi dvěma povrchy, ale důrazně se doporučuje, aby byly všechny povrchy pokud možno ve vyrovnané poloze.
- Nesterilizujte EZ-100/150 při vysoké teplotě.
- Při rolování EZ-100/150 se ujistěte, že jsou pacientovy vlasy umístěny na vnější vrstvě a mimo dosah rolování k okraji, aby se zabránilo zachycení vlasů během rolování
- EZ-100/150 očistěte povrchovým dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte vysokou teplotu.
- Bezpečné pracovní zatížení je 200 kg.

## POKYNY K POUŽITÍ

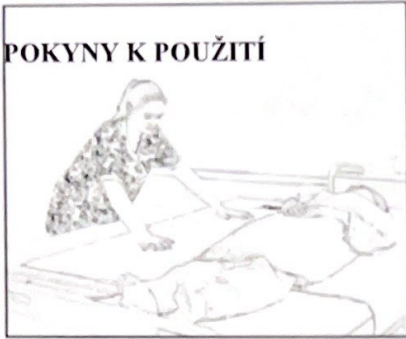

1. Rozložte EZ-100/150 a nasuňte ji vedle pacienta.



2. Nakloňte pacienta na jednu stranu a narolujte pod něj EZ-100/150




3. Jemně pacienta tlačte a EZ-100/150 se jednoduše přesune přes mezeru z postele do postele



4. Nakloňte pacienta na stranu a vysuňte EZ-100/150 zpod pacienta. Pak můžete podložku snadno vytáhnout.

## VÝKRES A SEZNAM ČÁSTÍ

### 【EZ-100】

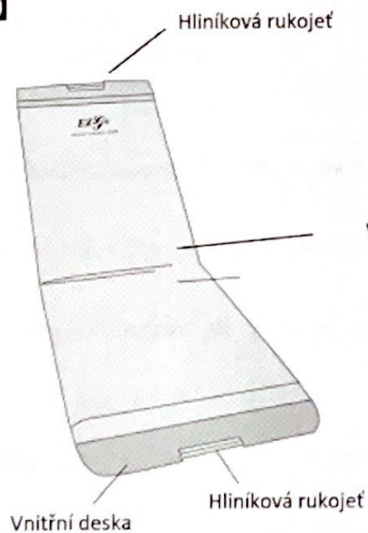

### 【EZ-150】

