


APLIKACE




1. Upevněte popruh nad ránu.




2. Utáhněte popruh a omotejte ho kolem nohy/paže.

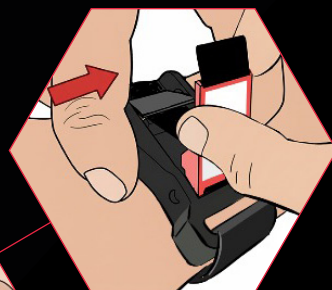

3. Použijte páku.

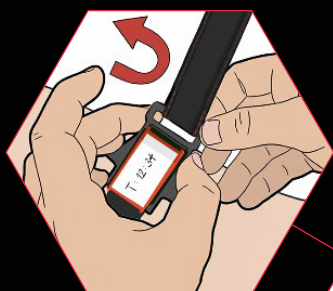

6. Odstraňte povolením popruhu.

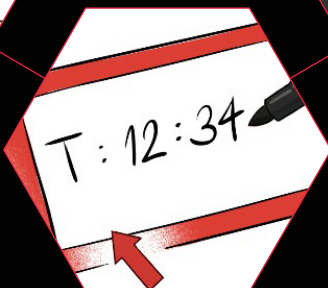

5. Zapište si dobu použití.



4. Zatáhněte za popruh, zajistěte ho páčkou a podle potřeby znovu utáhněte.

VÝROBCE
A DISTRIBUTOR

WILD US, s.r.o.
A. Václavíka 241
763 26 Luhačovice

VAT ID: CZ21815950

info@wildus.cz
+420 720 344 344

www.wildus.cz