

Uživatelský Manuál



WARNING

Tyto pokyny představují obecné pokyny určené pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem.



Instrukce:

STEP 1:

Demontujte imobilizér hlavy odstraněním obou podpěrných podložek a povolením všech popruhů. Umístěte základní desku pod středový otvor na čelní straně desky. Pokud zadní deska nemá středový otvor, umístěte ji odpovídajícím způsobem.

STEP 2:

Přípevněte popruhy tak, že je provléknete skrz štěrby po straně opěradla a umístíte je přímo na zajišťovací pásy. Pokud nejsou žádné štěrby, provléknete popruhy pod opěradlem a připevněte je.

STEP 3:

Pokud má zadní deska středový otvor umístěný na hlavě zadní části zadní desky, protáhněte horní popruh otvorem a smyčku zpět sponou a utáhněte. Pokud není žádný středový otvor, nechte popruh připevněný k sobě.

STEP 4:

Ujistěte se, že jsou všechny popruhy utažené a že základová deska stojí na zadní desce. Umístěte podpěrné polštáře kolem hlavy pacienta tak, aby plochá strana polštáře přiléhala k uším.

STEP 5:

Jakmile jsou podpěrné polštáře připevněny, vycentrujte řemínek na čelo / bradu přes čelo pacienta a každou stranu zajistěte protažením obou konců řemínku skrz kroužky „D“ a jejich zaklapnutím zpět. O použití druhého řemínku na čelo / bradu by měl rozhodnout odborník.

Head Immobilizer



MS-91000

Distributor ČR:
ALFA-RESCUE s.r.o.
Čiklova 637/13
128 00 Praha 2 – Nusle
Czech Republic
IČ: 24227331
DIČ: CZ24227331
www.alfarescue.cz



MedSource Labs
8600 Shelby Court, Chanhassen, MN 55317 USA
+1 952-472-0131
www.medsourcelabs.com



Viz návod k použití



Nesterilní



Pozor, prostudujte si průvodní dokumenty



Výrobce



Zástupce EHP



Katalogové číslo

MedSource Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 19, 73117 Wangen, Germany
+49 (0) 71 61 - 98 34 999
info@medsourcelabs.com