

Uživatelský Manuál



Popis

MedSource Patient Mover jsou speciálně navrženy pro pohyb pacientů. Je to skvělé řešení pro přepravu pacientů ze stísněných prostor nebo ze schodů. Nosnost pacienta je 650 kg. Patient Mover je určen pro omezené použití. Pokud je jednotka poškozená, roztržená nebo pořezaná, vyměňte ji za novou. Lze jej prát v pračce na 60 stupňů. Pamatujte, že při praní v pračce se impregnace sníží.



Instrukce

Umístěte pacienta pod pacienta. Opatrně zvedněte pacienta pomocí rukojetí. Ke zvednutí pacienta jsou zapotřebí minimálně 2 pracovníci, doporučuje se 4 - 6 pracovníků. Není určeno pro použití u pacientů s podezřením na poranění páteře.


MedSource Patient Mover by měl používat pouze kvalifikovaný a řádně vyškolený personál. Každý, kdo používá Patient Mover, by si měl před použitím procvičit aplikaci a důkladně se seznámit se všemi lékařskými protokoly a aspekty jeho použití. Tyto pokyny jsou poskytovány pouze jako vodítko. Používejte protokoly a techniky stanovené místním lékařským dozorem.

Patient Mover

REF

MS-95202/MS-95201



 : MedSource Labs
8600 Shelby Court, Chanhassen, MN 55317 USA
+1 952-472-0131
www.medsourcelabs.com

 MedSource Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 19, 73117 Wangen, Germany
+49 (0) 71 61 - 98 34 999
info@medsourcelabs.com



Viz návod k použití



Nesterilní



Pozor, prostudujte si
přívodní dokumenty



Výrobce



Zástupce EHP



Katalogové číslo

Distributor ČR:
ALFA-RESCUE s.r.o.
Čiklova 637/13
128 00 Praha 2 – Nusle
Czech Republic
IČ: 24227331
DIČ: CZ24227331
www.alfarescue.cz