


MedSource
Transport and Immobilization

Patient Mover Rescue Chair

Ref. MS-95206

ALWAYS
make sure
to grasp handles
directly across
from each other.

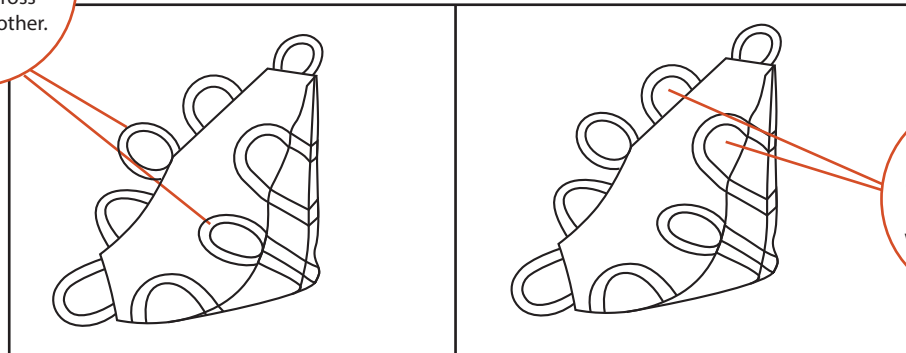

NEVER
cross handle.
Operators should
always be in line
with one another.

Umístěte záchrannou židli MedSource Patient Mover Rescue Chair tak, aby pásy byly na vnější straně pacienta. Pro bezpečné zvedání a přepravu pacientů vyžaduje Patient Mover minimálně 2 - 4 vyškolené odborníky. Rukojeti by měly být drženy v jedné linii s osobou na opačné straně jednotky. Nepřekračujte rukojeť. Tato jednotka by se neměla používat při podezření na poranění páteře.

Varování

- Nepřekračujte rukojeť
- Zabraňte kontaktu s ostrými předměty
- Nepoužívejte, pokud jsou propíchnuté, roztrhané nebo nadměrně opotřebované - Ke zvedání používejte pouze rukojeti
- Před zvedáním buďte opatrní, abyste zajistili bezpečné uchopení - Vyvarujte se přetahování po nerovném povrchu
- Nepřipojujte k mechanickým zvedákům

Distributor ČR:
ALFA-RESCUE s.r.o.
Čiklova 637/13
128 00 Praha 2 – Nusle
Czech Republic
IČ: 24227331
DIČ: CZ24227331
www.alfarescue.cz

Manufacturere: MedSource Labs, 8600 Shelby Court, Chanhassen, MN 55317 USA
EC Representative: MedSource Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 19, 73117 Wangen, Germany
www.medsourcelabs.com