

MedSource

Fast Stretcher [Manual]

REF Model: MS-95220 (black)/ MS-95208 (white)



Popis



MedSource Fast Stretcher jsou speciálně navrženy pro pohyb pacientů. Je to skvělé řešení pro přepravu pacientů ze stísněných prostor nebo ze schodů. Nosnost pacienta je 227 kg. Fast Stretcher je určen pro omezené použití. Pokud je jednotka poškozená, roztřepená nebo porezaná, vyměňte ji za novou. Lze jej prát v pračce na 60 stupňů. Pamatujte, že při praní v pračce se impregnace snižuje.

Instruction




Umístěte pacienta pod pacienta. Opatrně zvedněte pacienta pomocí rukojetí. Ke zvednutí pacienta jsou zapotřebí minimálně 2 pracovníci, doporučuje se 4 - 6 pracovníků. Není určeno pro použití u pacientů s podezřením na poranění páteře.

MedSource Fast Stretcher by měl používat pouze kvalifikovaný a řádně vyškolený personál. Každý, kdo používá Fast Stretcher, by si měl před použitím procvičit aplikaci a důkladně se seznámit se všemi lékařskými protokoly a aspekty jeho použití. Tyto pokyny jsou poskytovány pouze jako vodítko. Používejte protokoly a techniky stanovené místním lékařským dozorem.

Distributor ČR:
ALFA-RESCUE s.r.o.
Čiklova 637/13
128 00 Praha 2 – Nusle
Czech Republic
IČ: 24227331
DIČ: CZ24227331
www.alfarescue.cz

MedSource

 8600 Shelby Court
Chanhassen, MN 55317 USA
+1 952-472-0131
www.medsourcelabs.com

 
MedSource Europe GmbH, Robert-Bosch-Str. 19,
73117 Wangen, Germany, info@medsourcelabs.com
+49 (0) 71 61 - 98 34 999



Viz návod k použití



Nesterilní



Pozor, prostudujte si průvodní dokumenty



Výrobce



Zástupce EHP



Katalogové číslo