

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím doporučujeme pozorně přečíst.

NÁZEV: PÁTEŘNÍ DESKA EPD-10

TYP: EPD-10



EGO Zlín, spol. s r. o.
U Pekárny 438
763 14 Zlín – Štípa
Česká republika

IČO: 46902473
tel: +420 577 100 031
fax: +420 577 914 363
www.egozlin.cz



ÚČEL POUŽITÍ:

Páteřní deska je vhodná pro transport zraněných osob zdravotnickou záchrannou službou, v nemocnicích, na bojištích a ve sportovních zařízeních. Výrobek lze také používat v běžném provozu.

POPIS VÝROBKU:

Páteřní deska s bezpečnostními popruhy je vyrobena z polyetylenového materiálu, který neuvolňuje žádné kontaminující látky a je velmi odolný vůči opotřebení. Tato plastová páteřní deska, může být použita jako plovoucí zařízení. Struktura zařízení umožňuje použití rentgenového záření, neboť je dokonale průsvitná. Tento výrobek je kompatibilní s většinou zařízení pro znehybnění hlavy a s mechanismy vybavenými popruhy. Používá se zejména v nemocnicích, sportovních zařízeních, zařízeních zdravotnické záchranné služby a při outdoorových aktivitách pro přepravu zraněných osob.

Technické parametry:

Materiál	Páteřní deska: HDPE Fixační popruhy: polyester
Nosnost	maximálně 159 kg


Hmotnost	páteční deska 7 kg popruhy 0,5 kg
Rozměr (DxŠxV)	181 x 44 x 5 cm

POSTUP ZPROVOZNĚNÍ:


Před každým použitím je nutno páteční desku a bezpečnostní fixační popruhy vizuálně zkontrolovat!

Fixační popruhy na páteční desku nasadte dle následujícího postupu:

1 Rozložte fixační popruhy tak, aby dva ramenní fixační popruhy byly umístěny na širší straně páteční desky.

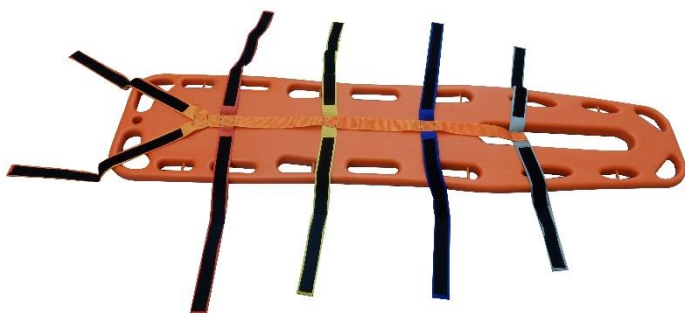

2. Bezpečnostní fixační popruhy provlečte pod otvory v páteční desce.

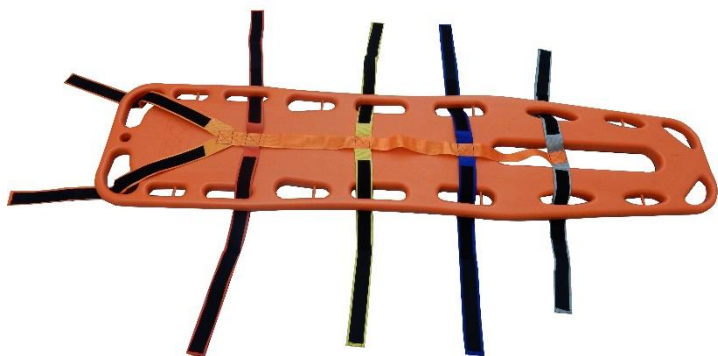

3. Následně připevněte fixační popruhy k sobě.



Upozornění:

Ujistěte se, že po zafixování těla zraněné osoby k páteřní desce:

- 1. jsou fixační popruhy dostatečně utaženy.**
- 2. je horní část těla zraněné osoby umístěna na širší straně desky.**

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Pravidelně čistěte!

- V případě znečištění od bláta, prachu apod. očistěte výrobek běžnými čisticími prostředky (saponáty, mýdlová voda apod.)
- V případě znečištění od krve můžete fixační pásy a popruhy vyčistit 2 % roztokem peroxidu vodíku.
- Pro dezinfekci použijte běžné dezinfekční prostředky dle pokynů uvedených výrobcem dezinfekčního prostředku.

POZOR!!

Nečistěte žádnými rozpouštědly, např. benzinem, acetonem, toluenem.

SKLADOVÁNÍ:

Výrobek skladujte v čistých a suchých skladovacích prostorách.

Životnost výrobku závisí na četnosti používání a na dodržování předepsané údržby a způsobu skladování.

POKYNY K LIKVIDACI:

Výrobek je po skončení své životnosti, vlivem nesprávné údržby nebo skladování, nebo v případě poškození takového rázu, že je dále neopravitelný a nepoužitelný, určen k likvidaci.

Výrobek určený k likvidaci musí být předán oprávněné firmě provádějící odběr a likvidaci odpadu.

Vždy dodržujte předpisy dané země pro nakládání s odpady.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS:

Záruka je poskytnuta po dobu 24 měsíců od data nákupu.

V této záruční době opraví EGO Zlín, spol. s r.o. kompletně všechny závady způsobené vadou materiálu nebo zpracováním u výrobce.

Záruka se nevztahuje na běžné fyzické opotřebení, na vady způsobené nesprávným zacházením uživatele a na mechanické poškození.

EGO Zlín, spol. s r.o. zajišťuje záruční i pozáruční servis po celou dobu životnosti výrobku. **Výrobek musí být dodán k opravě čistý a dezinfikovaný!**

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za nevhodné použití výrobku.