

# Plasti-med®

## NOSNÍ KYSLÍKOVÁ KANYLA / PRO DOSPĚLÉ

**REF** 130 101

**LOT** 1210212

 2012.02

 2017.02



**C** **€**0473



DEHP



### UPOZORNĚNÍ

Nesterilní výrobek na jedno použití pro jednoho pacienta.  
Dávejte pozor, aby se hadičky nezkroutily a nerozmačkaly.  
Regulaci zdroje kyslíku je nutné provádět oprávněnou osobou.

### VŠEOBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

1. Nasad'te nosní nástavec.
2. Veď'te trubičky připojené k nosnímu nástavci kolem uší a pod bradou.
3. Nasad'te nastavitelný díl pod bradu pacienta a nastavte tak, aby těsnil.
4. Připojovací hadičku těsně upevněte ke zdroji kyslíku.
5. Nastavte potřebný tlak kyslíku a zajistěte jeho přísun pacientovi.
6. Ujistěte se, že přísun kyslíku probíhá.



**Plasti-med Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.**

**İrtibat:** İstanbul Deri Org. Yan. San. YA/11 İSTANBUL-TÜRKİYE

**Tel:** 0090 (216) 591 0 491 **Fax:** 0090 (216) 591 0 490 **WEB:** <http://www.plasti-med.com>

Made in TÜRKİYE

Iss. Date 04.06.10 Rev01