

# Plasti-med®

## KYSLÍKOVÁ MASKA / DĚTSKÁ

**REF** 130 104

**LOT** 1240212



2012.02



2017.02



**CE** 0473



DEHP



8 1698573 1031099 1

### UPOZORNĚNÍ

Nesterilní výrobek na jedno použití pro jednoho pacienta. Dávejte pozor, aby se hadičky nezkroutily a nerozmačkaly. Regulaci zdroje kyslíku je nutné provádět oprávněnou osobou.

### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umístěte masku na tvář pacienta tak, aby zakývala ústa a nos. Přetáhněte elastický popruh přes hlavu a uši pacienta na krk. Na nos usadte kovový proužek a upravte dle tvaru nosu.
2. Připojte spojovací hadičku jednou stranou ke zdroji kyslíku a stranou druhou ke konektoru masky. Zkontrolujte, zda jsou všechna spojení pevná.
3. Nastavte potřebný tlak kyslíku a zajistěte jeho přísun pacientovi. Ujistěte se, že přísun kyslíku probíhá.



**Plasti-med Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.**

İrtibat: İstanbul Deri Org. Yan. San. YA/11 İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel: 0090 (216) 591 0 491 Fax: 0090 (216) 591 0 490 WEB: <http://www.plasti-med.com>

Made in TÜRKİYE

Iss. Date 04.06.10 Rev01