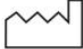

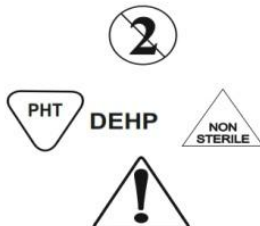


Plasti-med®

NEBULIZÁTOR / PRO DOSPĚLÉ

REF 130 106
LOT 1250212
 2012.02
 2017.02



CE 0473



UPOZORNĚNÍ

Nesterilní výrobek na jedno použití pro jednoho pacienta.
Dávejte pozor, aby se hadičky nezkroutily a nerozmačkaly.
Regulaci zdroje kyslíku je nutné provádět oprávněnou osobou.

VŠEOBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umístěte masku na tvář pacienta tak, aby zakrývala ústa a nos. Přetáhněte elastický popruh přes hlavu a uši pacienta na krk. Na nos usad'te kovový proužek a upravte dle tvaru nosu.
2. Jeden konec spojovací hadičky připojte k nebulizátoru (zásobníku na léky), druhý konec k přívodu kyslíku. Zkontrolujte, zda všechny spoje dobře sedí.
3. Nastavte potřebný tlak kyslíku a zajistěte jeho přísun pacientovi. Ujistěte se, že přísun kyslíku probíhá.
4. Při používání sady nebulizátoru je třeba brát v úvahu i níže uvedené okolnosti.



Plasti-med Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.

İrtibat: İstanbul Deri Org. Yan. San. YA/11 İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel: 0090 (216) 591 0 491 **Fax:** 0090 (216) 591 0 490 **WEB:** <http://www.plasti-med.com>

Made in TÜRKİYE

Iss. Date 04.06.10 Rev01