

UŽIVATELSKÝ MANUÁL KYSLÍKOVÁ MASKA PRO VYSOKÉ KONCENTRACE

REF ČÍSLA: 130060-130110-130111

ÚČEL: Používá se k podávání kyslíku ve vysoké koncentraci nejkritičtějším pacientům v akutních stavech a při otravách oxidem uhelnatým.

INFORMACE O OBSAHU: Kyslíková maska, hadička masky, gumička masky, nosní páska, rezervoár, T konektor, Ventily zabraňující opakovanému vdechnutí vydechaného vzduchu

VAROVÁNÍ a BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pouze pro jednorázové použití. **NEPOUŽÍVEJTE ZNOVU, NEPŘEDÁVEJTE ZPRACOVAT ANI NESTERILIZUJTE.** Opětovné použití, ošetření nebo sterilizace může narušit strukturální integritu zařízení a/nebo způsobit zranění nebo onemocnění pacienta v důsledku nesprávné funkce zařízení.

Opětovné použití nebo léčba může představovat riziko kontaminace zařízení a/nebo infekce pacienta nebo kontaminace pacienta nebo lékaře jiným pacientem, a tak může vést k přenosu infekčních onemocnění z jednoho pacienta na druhého a dalším problémům. Kontaminace zařízení může mít za následek onemocnění pacienta a uživatelů v důsledku infekce.

Před použitím zařízení pečlivě prohlédněte, abyste se ujistili, že jeho obsah nebo jeho sterilní obal nebyly během přepravy poškozeny. V případě poškození **NEPOUŽÍVEJTE**. Poškozený výrobek ihned vraťte prodejci nebo společnosti Plasti-med. Tento personalizovaný produkt je určen pro použití u jednoho pacienta.

Před každým použitím se doporučuje vizuálně zkontrolovat připojení konektorů. Kontaminace a koroze mohou být zavádějící detekci.


KONTRAIKACE: Nejsou známy žádné kontraindikace.

KOMPLIKACE:

Možné komplikace zahrnují tyto, ale nejsou na ně omezeny:

Maska by měla dobře sedět na obličeji, pokud je kolem masky otvor, měla by být nasazena menší maska. Je třeba věnovat pozornost kontaktu s tekutinou, aby se maska na obličeji fixovala a zabránilo jejímu sklouznutí. Měla by být preferována jednorázová maska. Kyslíková maska může vytvářet tlak na nos a tváře, pacient musí být sledován a musí být prováděny masáže na tlakových oblastech, aby se předešlo nahromadění krve. Pacient by měl být sledován kvůli riziku aspirace. Masky by se neměla používat u zvracících pacientů, protože může způsobit aspiraci. Během operace je třeba dbát na to, aby nedošlo k ucpání dýchacích cest přehnutím nebo složením hadice.

NÁVOD K POUŽITÍ:

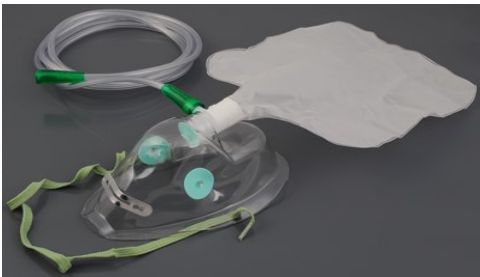

Pacient je informován, pokud je při vědomí. Rukavice jsou nasazené.

Vybere se jednoduchá obličejová maska odpovídající věku pacienta a anatomii obličeje.

Úzká horní část masky ve tvaru trojúhelníku musí být umístěna na kořen nosu a široká základna musí být umístěna do žlábků mezi spodním rtem a čelistí.

Připojení mezi jednoduchou obličejovou maskou a zdrojem kyslíku je provedeno.

Je nastaveno množství kyslíku, které má být pacientovi podáno.

Hladina kyslíku by měla být dobře nastavena, kyslík by měl být podáván rychlostí nižší než 10 litrů/minutu, ujistěte se, že jsou ventily aktivní, aby se zabránilo návratu oxidu uhličitého, který se dostane od pacienta do masky.

Kovový pásek v úzké části masky je upevněn na nose.

Gumová páska masky se protáhne za hlavu pacienta.

Kyslík musí být dodáván s vysokou hustotou 10-15 l/min (80-100%).

Když je pacientovi podáván kyslík, dbejte na to, aby byl současně naplněn kyslíkem i zásobníkový balónek.

V případě potřeby poskytněte pacientovi kyslíkovou podporu po stisknutí balónku se zásobníkem plného kyslíku pod maskou.

CÍLOVÁ SKUPINA: Skupina dospělých a pediatrických pacientů.
DOBA POUŽITÍ: Jednorázové použití. Používá se během aplikace.
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Skladujte při pokojové teplotě.

ZPŮSOB LIKVIDACE: Postup likvidace produktů po použití:

S použitými produkty je třeba okamžitě zacházet jako se zdravotnickým odpadem a zlikvidovat jej v souladu s nařízeními o zdravotnickém odpadu, aby se odstranilo jakékoli riziko kontaminace.

PLASTI-MED Plastik Medikal Ürünler San.Tic.Ltd.Şti Deri OSB MAh. Yan Sanayi Cad. No:13 Tuzla-ISTANBUL-TURKEY Tel: +90(216) 591 04 91 (Pbx) Fax: +90(216) 591 04 90	2 strany Datum vydání: 26.08.2018 Datum revize: 14.12.2018 Číslo revize: 01
--	--



Dikkat



Tek
Kullanımlık



Ref
No:



Üretim
tarihi



Son
kullanım
tarihi



Lot
No



Paket
hasarlanmışsa
kullanmayınız



Steril
Değildir



Onaylayıcı
Kuruluş
Numarası

Pozor	Znovu nepoužívat	Katalogové číslo	Datum výroby	Spotřebujte do	Číslo šarže	Nepoužívejte pokud je balení poškozené	Nesterilní	Notifikovaný orgán Číslo
-------	------------------	------------------	--------------	----------------	-------------	--	------------	-----------------------------