

Plasti-med®

KYSLÍKOVÁ MASKA S VYSOKOU KONCENTRACÍ /
DĚTSKÁ

REF 130 111

LOT 1300212

 2012.02

 2017.02



CE 0473



DEHP



UPOZORNĚNÍ

Nesterilní výrobek na jedno použití pro jednoho pacienta.
Dávejte pozor, aby se hadičky nezkroutily a nerozmačkaly.
Regulaci zdroje kyslíku je nutné provádět oprávněnou osobou.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umístěte masku na tvář pacienta tak, aby zakryla ústa a nos. Přetáhněte elastický popruh přes hlavu a uši pacienta na krk. Na nos usad'te kovový proužek a upravte dle tvaru nosu.
2. Připojte spojovací hadičku jednou stranou ke zdroji kyslíku a stranou druhou ke konektoru masky. Zkontrolujte, zda jsou všechna spojení pevná.
3. Nastavte potřebný tlak kyslíku a zajistěte jeho přísun pacientovi. Ujistěte se, že přísun kyslíku probíhá.



Plasti-med Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.

İrtibat: İstanbul Deri Org. Yan. San. YA/11 İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel: 0090 (216) 591 0 491 **Fax:** 0090 (216) 591 0 490 **WEB:** <http://www.plasti-med.com>

Made in TÜRKİYE

Iss. Date 04.06.10 Rev01