

Univerzální dlahy AEROresc® - EASY Splint

Návod k použití

REF: HIMT02-SP-XL | HIMT02-SP-M | HIMT02-SP-XS | HIMT02-SP-XL-SET |
HIMT02-SP-M-SET | HIMT02-SP-SET1 | HIMT02-SPT-XL | HIMT02-SPT-M |
HIMT02-SPT-XS | HIMT02-SPT-XL-SET | HIMT02-SPT-M-SET | HIMT02-SPT-SET1

1. Bezpečnostní pokyny

- 1.1 Návod k použití nenahrazuje podrobné pokyny / školení uživatele.
- 1.2 Univerzální dlahy AEROresc® se mohou používat pouze ke stanovenému účelu popsanému v tomto návodu k použití.
- 1.3 Nepoužívejte na zlomeniny páteře a pánve.
- 1.4 Nepoužívejte na otevřené rány. Otevřené rány musí být před aplikací dlahy překryty sterilními obvazy.
- 1.5 Při řezání dlahy mohou vzniknout ostré hrany, které je nutné zakrýt nebo přehnout.
- 1.6 Při delším trvání léčby (> 1 h) by měla být na straně přiložené k pacientovi použita měkká podložka.
- 1.7 Při upevňování dlahy se ujistěte, že nedojde k přerušení průtoku krve a že špičky prstů na ruku nebo nohu zůstanou odkryté, aby bylo možné kontrolovat periferní krevní oběh.

2. Účel výrobku

Univerzální dlahy AEROresc® - EASY Splint slouží k imobilizaci a dlahování zlomenin a sportovních úrazů (např. natažených vazů). Mohou být také použity jako infuzní dlahy.

3. Popis výrobku


3.1 Univerzální dlahy AEROresc® - EASY Splint jsou vyrobené z lehkého materiálu prostupného pro rentgenové paprsky. Plášť je vyroben z plastové pěny (IXPE). Strana k pacientovi je „modrá“ nebo „šedá“ | vnější strana je „žlutá“ nebo „olivově zelená“. Jádro dlahy je vyrobeno z hliníkové slitiny.

3.2 Pružný materiál je možné:

- stříhat nůžkami (ne vroubkovanými) na požadovanou velikost
- předtvarovat, aby bylo možné postiženou část těla optimálně stabilizovat
- překládat, aby se zvýšila stabilita, podle potřeby ohýbat anebo kombinovat s dalšími dlahami.

4. Obsluha a manipulace

- 4.1 Dlahu vytvarujte tak, abyste docílili ideálního přilnutí k příslušné části těla.
- 4.2 Dlahu přiložte k postižené části těla a zajistěte ji elastickým obinadlem nebo páskou. Při dlouhodobém použití doporučujeme použít na straně pacienta polstrování.
- 4.3 Při fixaci dlahy se ujistěte, že můžete kontrolovat krevní oběh na prstech rukou nebo nohou.
- 4.4 Základní tvary:

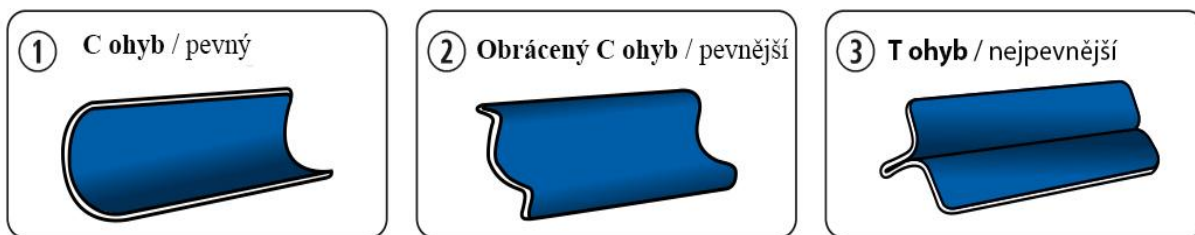

(1) C ohyb

Pro vytvoření C ohybu zatlačte oba vnitřní okraje dovnitř.

(2) Obrácený C ohyb

Vytvořte C ohyb a poté hrany přehněte opačným směrem.

(3) T ohyb

Obě hrany přitlačte k sobě a poté strany v polovině ohněte tak, aby ohyb dosáhl úhlu 90 °.

4.5 Příklady použití viz část „7. Příklady použití“.

Poznámka: Jakýkoliv závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto zařízením, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému úřadu.

5. Čistění a dezinfekce

5.1 Univerzální dlahy AEROresc® - EASY Splint čistěte a dezinfikujte po každém použití v souladu s místě platnými hygienickými předpisy.

5.2 Dlahy se dají čistit jemným čisticím prostředkem nebo povrchovou dezinfekcí. Dodržujte prosím pokyny výrobce.

5.3 Dlahy opláchněte čistou vodou, abyste odstranili čisticí a/nebo dezinfekční prostředek.

5.4 Nechte dlahy zcela vyschnout.

6. Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Velikost XL: 100 x 11 cm | approx. 160 g

Velikost M: 50 x 11 cm | approx. 80 g

Velikost XS: 5 x 11 cm | approx. 4 g

Materiál

Potah: pěnový polyetylén (IXPE)



Jádro: hliník

Skladovací teplota: - 25 °C až 65 °C

7. Příklady použití



Jsou možné i další způsoby aplikace!

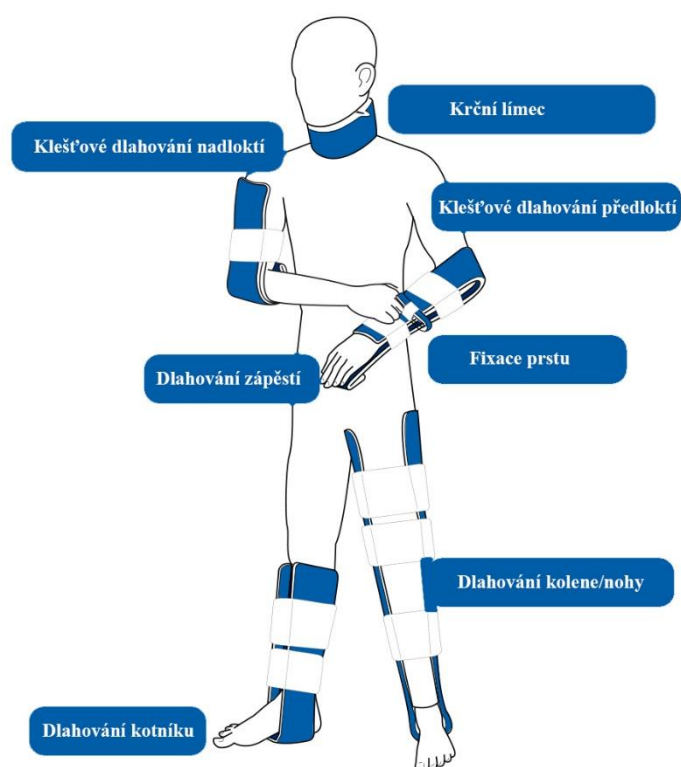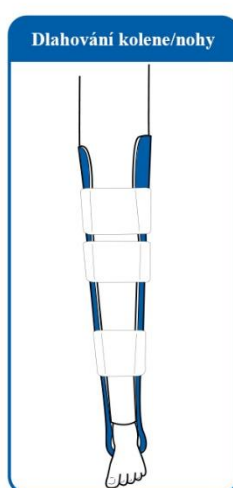

Vysvětlivky symbolů



Zdravotnický výrobek

Dovozce pro Evropu:

HUM Gesellschaft für Homecare und
Medizintechnik mbH
Zum Pier 79 | 44536 Lünen | Německo

Distributor ČR:

ALFA-RESCUE s.r.o.

Čiklova 637/13

Praha 2 –Nusle

12800

Czech Republic

www.alfarescue.cz